


Instrucciones Para El Uso De Hisopos Bucales




Comenzar limpio

Para mantener la integridad de la muestra de ADN, no deben comer, beber, o fumar 30 minutos antes de la toma. Haciendo eso no cambia el ADN o afecta el resultado de la prueba, pero sustancias extrañas en un hisopo pueden afectar negativamente la habilidad de extraer el ADN efectivamente.

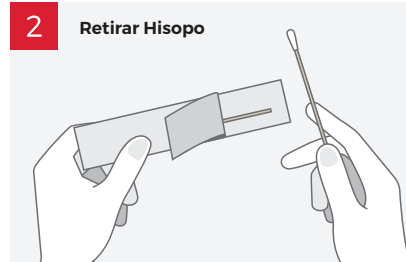


Retirar hisopo

Rompiendo el extremo del paquete cuidadosamente, retiré un hisopo bucal por el palo, teniendo cuidado de no dejar que el extremo con tela toque la mesa u otra superficie.

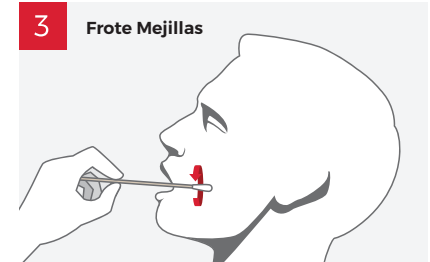

Cepillar para arriba y para abajo mientras rotando el hisopo

Usando un movimiento rotacional, frote la parte interior de la mejilla en ambos lados por 30 segundos completos, evitando el área de las encías lo más posible. Mueva el hisopo para arriba y para abajo mientras aun rotando para maximizar la colección de las células bucales que contienen el ADN. Recuerde que no está tomando saliva—está colectando células bucales. No escupir en los hisopos. Repetir paso número 2 con los hisopos restantes, alternando las mejillas con cada hisopo, asegúrese de usar los 4 hisopos.

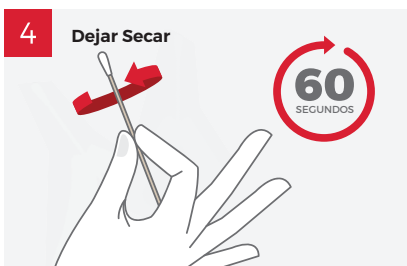

Dejar secar al aire por 60 segundos

Si los hisopos parecen ser “muy mojados,” agítelos de un lado a otro en el aire por 60 segundos. El hisopo no requiere estar completamente seco antes de colocarlo en el sobre de papel.



Coloque el hisopo en el sobre de papel

Teniendo cuidado de no tocar el extremo de tela, coloque el hisopo directamente en el sobre de muestra de papel. Los hisopos nunca deben ser colocados de regreso en la envoltura plástica o guardados en bolsas de plástico ya que esto puede degradar la muestra durante el envío.